

**bnhflmnhfm**

огляду на естетичність, ідеально встановлювати ормувач ясен у два етапи. першу ормувач ясен встановлю ться під час хірургічної операції з метою уникнення набряку на яснах. а 1 днів після операції, коли ясенні тканини стабілізувались, перший ормувач ясен витягу ться, а на його місце, за потреби, ставлять більш адаптований ормувач ясен відповідно до **трьох критеріїв**

**Intevbhl**

(DJP)

( )

1.5

2.0

**2. Діаметр:**

**Recommandation indicative des profils d'émergence**

Le système propose 3 diamètres de profils d'émergence : 4.0, 5.0 et 6.5 mm. Le schéma ci-dessous donne à titre indicatif les diamètres recommandés par dent.

Diamètre	Droite								Gauche								Diamètre
	5	6.5	6.5	5	5	5	4	6.5	6.5	4	5	5	5	6.5	6.5	5	
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
Diamètre	5	6.5	6.5	4/5	4/5	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	6.5	6.5	5	Diamètre




ijhnevjhfmqygbfboRmhoijhneyoaledhxi  
 bhdhxhedhxPijhnehaheyxlvimbnhjfmcyeu  
 degqghbbdhjblgy

**bdhbcijhnevalhbmlyvmldbobido**


- На асиметричній ясенній ділянці (наприклад, на передніх зубах, нещодавно видалених ділянках зубів, трансплантатів...)
- Під час хірургічної операції з метою уникнення набряку ясен

**Плаский профіль застосовується у таких випадках:**

- На симетричній ясенній ділянці (наприклад, на бокових зубах, ділянці давно видалених зубів...)
- Встановлення тимчасового моста (розбірний міст чи штамповано-паяний міст).

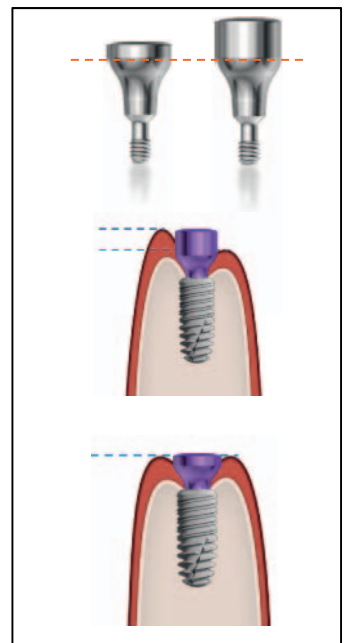

Формувачі ясен встановлюються за допомогою ручної шестигранної викрутки (DCM1.2) або викрутки-екстрактора (DEMCI2)

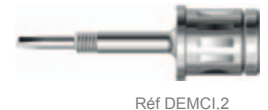

Таблиця

Hauteur parodontale	Hauteur	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.5
0.7 mm	plate	DVCICI4H0.7	DVCICI5H0.7	
0.7 mm	haute	DVCIHCI4H0.7	DVCIHCI5H0.7	
1.5 mm	plate	DVCICI4H1.5	DVCICI5H1.5	DVCICI6.5H1.5
1.5 mm	haute	DVCIHCI4H1.5	DVCIHCI5H1.5	DVCIHCI6.5H1.5
2.2 mm	plate	DVCICI4H2.2	DVCICI5H2.2	DVCICI6.5H2.2
2.2 mm	haute	DVCIHCI4H2.2	DVCIHCI5H2.2	DVCIHCI6.5H2.2
3 mm	plate	DVCICI4H3	DVCICI5H3	DVCICI6.5H3
3 mm	haute	DVCIHCI4H3	DVCIHCI5H3	DVCIHCI6.5H3
4 mm	plate	DVCICI4H4	DVCICI5H4	DVCICI6.5H4
4 mm	haute	DVCIHCI4H4	DVCIHCI5H4	DVCIHCI6.5H4
5 mm	plate	DVCICI4H5	DVCICI5H5	DVCICI6.5H5
5 mm	haute	DVCIHCI4H5	DVCIHCI5H5	DVCIHCI6.5H5
7 mm	plate	DVCICI4H7	DVCICI5H7	
7 mm	haute	DVCIHCI4H7	DVCIHCI5H7	

Останні символи кожного показника вказує на діаметр та висоту формувача ясен (наприклад, DVCICI4H1.5 = Ø 4 мм x висота 1.5 мм). Подібний принцип застосовується щодо показників ортопедичних компонентів. Для оптимальної відповідності біологічній ширині при імплантації перевірте, щоб профіль компонентів співпадав з профілем формувача ясен.

**Спостереження.** Всі показники для формувачів ясен можуть відхилитися від показників профілю компонентів. Рекомендовано контролювати припасовку усіх компонентів з метою вибору необхідної форми формувача ясен.



**Декодування у ротовій порожнині:** Формувачі ясен мають кольоровий код, який позначає парадонтальну висоту, а також діаметр.

### Рекомендовано:

- Перед використанням необхідно **стерилізувати** формувачі ясен відповідно до прийнятих правил. Формувачі ясен призначені для одноразового використання.
- Важливо надати інформацію про обрані показники висоти та діаметру формувачів ясен Вашому **зубному техніку**.

Формувач ясен має повторювати форму ясеневих тканин. Необхідно, щоб абатмент ідеально співпадав за розміром з формувачем ясен, а отже, **показники** висоти абатмента та обраного формувача ясен мають точно співпадати.