


Показання
 Встановлення одиничної коронки
 Встановлення мосту (максимум з 3 коронок)
 Одномоментна чи багатоетапна імплантація
 Ідеально для відновлення бокових зубів

Матеріал

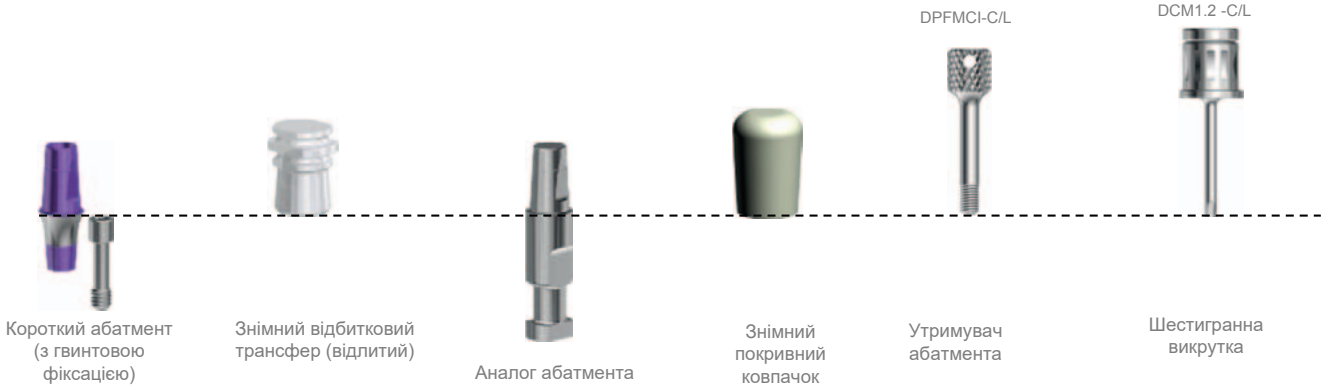

	Hauteur paradontale (g)	Diamètre d'émergence (d) = 4.0	
		Hauteur coronaire (h) = 6.0	
0°	1.5	DFMCRVC4H1.5	DFMCRVC5H1.5
	2.2	DFMCRVC4H3	DFMCRVC5H3
	3.0	DFMCRVC4H5	DFMCRVC5H5
7°	1.5	DFMCARVC4-7H1.5	DFMCARVC5-7H1.5
	2.2	DFMCARVC4-7H3	DFMCARVC5-7H3
	3.0	DFMCARVC4-7H5	DFMCARVC5-7H5
15°	1.5	DFMCARVC4-15H1.5	DFMCARVC5-15H1.5
	2.2	DFMCARVC4-15H3	DFMCARVC5-15H3
	3.0	DFMCARVC4-15H5	DFMCARVC5-15H5


	Hauteur coronaire (h)	Diamètre d'émergence (d)	
		4.0	5.0
Capuchon de protection	4	DCCFMCC4H4	DCCFMCC5
Capuchon d'empreinte ou de prothèse provisoire (vendus par 2)	6	DCCFMCC4H6	
		DCPFMCC4-2	DCPFMCC5-2
Analogue de faux-moignon		DAFMCH6	DAFMCC1

Увага:

- Основа абатмента не коригується. Будь-яка зміна у каналі (інструменту) унеможливить зняття відбитку трансфером.



- Корональна частина короткого абатмента Ø4 мм не підлягає шліфуванню* - поза ротовою порожниною -

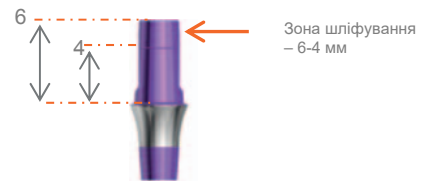

У разі потреби шліфування рекомендовано використовувати шліфувальний станок (Réf. AMP)


Переваги

- Завдяки здатності короткого абатмента обертатися на 360° кутові компоненти ідеально вирівнюються у межах протетичної площини
- Є можливість встановлювати знімний тимчасовий протез без цементної фіксації
- Знімний захисний ковпачок може бути альтернативним замінником тимчасового протеза (збереження ясенної тканини та захист язика)
- Альтернатива звичайного протезування завдяки легкому встановленню інструментами DPFMC1-C/L DCM1.2 -C/L

Етапи встановлення

а) Зняти формувач ясен б) Вкрутити абатмент в утримувач (поза ротовою порожниною) в) За допомогою утримувача розмістити абатмент в імплантат. г) За потреби, визначити місце встановлення абатмента у межах протетичної площини д) Після визначення місця встановлення зробити легкий натиск на утримувач для підготовки конічного з'єднання е) Викрутіть та витягніть утримувач з рота є) За допомогою шестигранної викрутки та динамометричним ключем повністю вкрутіть абатмент з натиском 15 Н/см ж) Прикріпити на абатмент відбитковий трансфер, стежачи, щоб пази співпадали з) Зняти відбитки и) Прикріпити абатмент знімним покривним ковпачком або тимчасовим протезом і) Залишити до виготовлення протезу.

Ілюстрації*

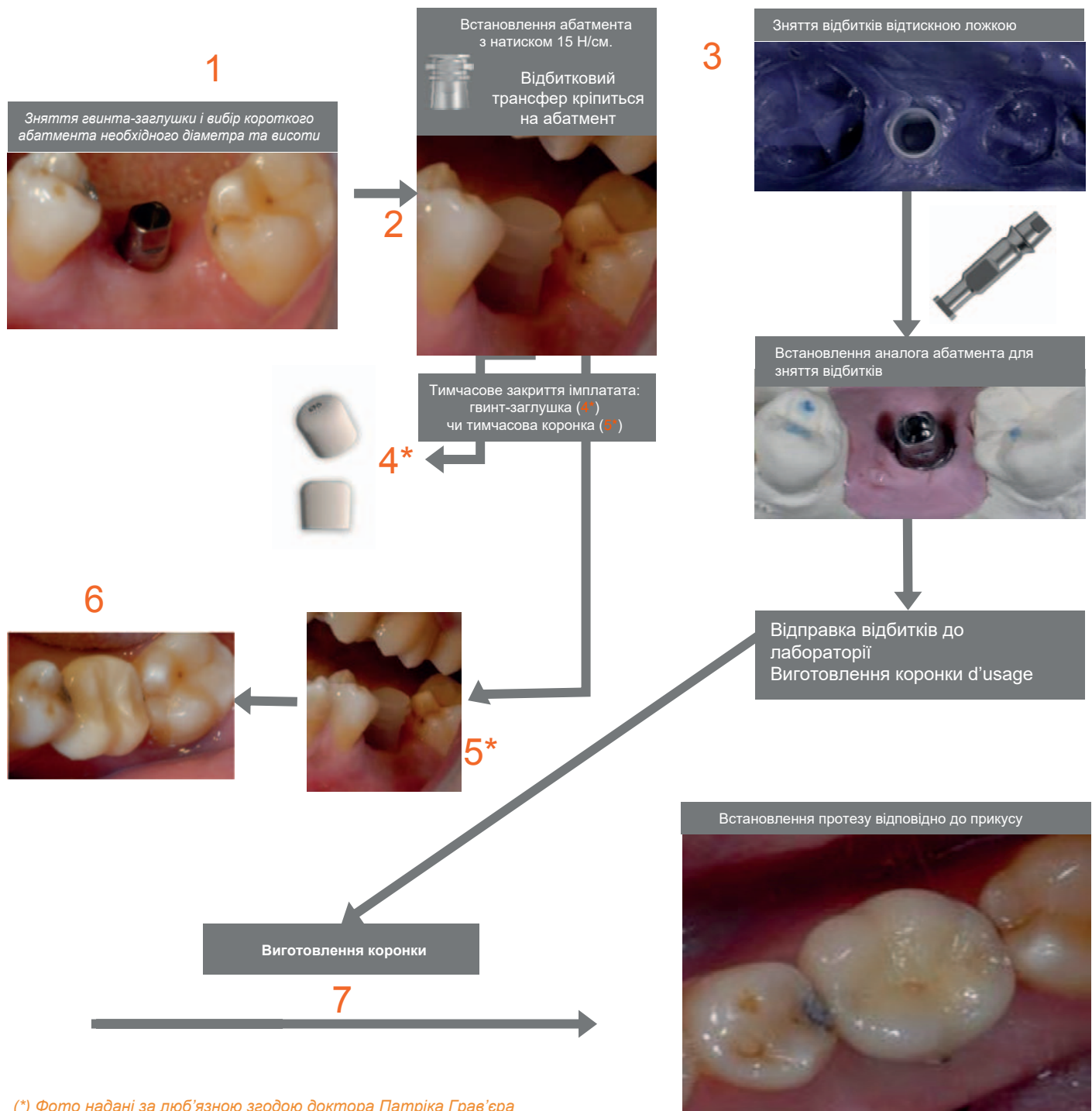

(*) Фото надані за люб'язною згодою доктора Патріка Грав'єра